






Übersicht Drehmomente

Implantat		Empfohlen	Maximum	Deckschraube	
MultiNeO™		35 Ncm	50 Ncm	Manuell	
Prothetik		CHC	CS	Abutmentniveau	Schraubendreher
Gingivaformer, Abdruckpfosten, Scanbody		Manuell	Manuell	Manuell	
0° Alpha Universe		30 Ncm	30 Ncm	-	1,5
17° & 30° Alpha Universe		20 Ncm	30 Ncm	-	1,25
Abutments		20 Ncm	30 Ncm	25 Ncm	1,25

Kundenhotline Deutschland: +49 221 50085590 · Kundenhotline Österreich: +43 1 8928990
 (S)implantology statt Implantology. MultiNeO™ von Alpha-Bio Tec.

Bohrprotokoll

Ø	Knochentyp IV			Knochentyp II - III			Knochentyp I							
3,2	○ 2,0			○ 2,0	● 2,4 2,8		○ 2,0	● 2,4 2,8	● 2,8 3,0					
3,5	○ 2,0	● 2,0 2,4		○ 2,0	● 2,4 2,8	● 2,8 3,0	○ 2,0	● 2,4 2,8	● 2,8 3,2					
3,75	○ 2,0	● 2,4 2,8		○ 2,0	● 2,4 2,8	● 2,8 3,2	○ 2,0	● 2,4 2,8	● 2,8 3,2	● (3,2)* (3,65)*				
4,2	○ 2,0	● 2,4 2,8	● 2,8 3,2	○ 2,0	● 2,4 2,8	● 3,2 3,65	○ 2,0	● 2,4 2,8	● 3,2 3,65	● (3,65)* (4,1)*				
5,0	○ 2,0	● 2,4 2,8	● 3,2 3,65	○ 2,0	● 2,4 2,8	● 3,2 3,65	● 3,65 4,1	○ 2,0	● 2,4 2,8	● 3,2 3,65	● 3,65 4,1	● 4,1 4,5	● (4,5)* (4,8)*	

* Mit dem breiteren Durchmesser durch die Kortikalis bohren.

Kundenhotline Deutschland: +49 221 50085590 • Kundenhotline Österreich: +43 1 8928990

(S)implantology statt Implantology. MultiNeO™ von Alpha-Bio Tec.